



Systém kontinuálního monitorování hladiny glukózy

Rychlý průvodce v češtině

1 Přehled systému

Balení senzoru: Senzor je uložen ve sterilním balení. Balení senzoru je určeno pro jednorázové použití.

- 1A Balení vysílače: Vysílač se zasune do senzoru a pomocí Bluetooth odešle v reálném čase měřené hodnoty glykémie do vašeho
- 1B kompatibilního zařízení.

2 NASTAVENÍ APLIKACE

Během nastavování je vyžadován bezpečný přístup k internetu.

1. Začínáme

- Stáhněte si aplikaci iCan z App Store nebo Google Play.
- Otevřete aplikaci
- Přihlaste se nebo vytvořte účet

2. Nastavení

- Postupujte podle pokynů aplikace k nastavení a spárování s vysílačem.
- Pokyny pro vložení senzoru naleznete níže.

4. Interpretace výsledků CGM

Více informací naleznete v uživatelské příručce iCan.

3. Zahřívání senzoru

Během 2hodinového zahřívání senzoru nebude provádět žádné odečty ani nebude dostávat upozornění, dokud zahřívání neskončí.

3 Vložení senzoru

1. Spárování s vysílačem

- 1A Vyjměte balení vysílače zespodu krabice senzoru.
- 1B Zkontrolujte prvních 8 číslic SN kódu senzoru a vysílače, aby se shodovaly, než spárujete senzor s vysílačem.
- 1C Otevřete aplikaci a ujistěte se, že máte zapnutý Bluetooth. Naskenujte QR kód na balení senzoru pomocí aplikace.

2. Příprava

- 2A Umyjte si ruce mýdlem a vodou.
- 2B Vyberte místo na břiše pro vložení. (**Upozornění:** Vyhněte se jizvám, mateřským znaménkům, striím a místům, kam jste si aplikovali inzulin. Aby se zabránilo podráždění kůže, měňte místa mezi aplikacemi. Mějte na paměti svou pohodlnost a aktivitu.)
- 2C Vyčistěte místo aplikace alkoholovými tampóny. (**Upozornění:** Před vložním senzoru nechte místo aplikace uschnout.)

3. Připevnění senzoru

- 3A Z balení senzoru zcela odlepte víčko.
- 3B Položte balení vysílače na pevný rovný povrch. Zarovnejte modrou značku na aplikátoru senzoru s označením na podložce vysílače.
- 3C Pevně stiskněte senzorový aplikátor směrem dolů do podložky, dokud neslyšíte cvaknutí a dokud se nezastaví.
- 3D Jemně otočte bezpečnostním spínačem z ikony "Zamknuto" na ikonu "Odemknuto", dokud neslyšíte cvaknutí a dokud nebude možné spínač dále otáčet. (**Upozornění:** Po úplném uvolnění bezpečnostního spínače nemačkejte bílé tlačítko uprostřed, abyste předešli nechtěným následkům nebo zranění.)
- 3E Jemně zvedněte nabitý senzorový aplikátor rovně nahoru. (**Upozornění:** Nedotýkejte se lepicí pásky.)
- 3F Teď je senzorový aplikátor připravený k vložení.

4. Vložení aplikátoru senzoru

- 4A Přiložte nabitý senzorový aplikátor na vybrané místo.
- 4B Stiskněte bílé tlačítko uprostřed, dokud neslyšíte zvuk vstřiku.
- 4C Jemně odtáhněte aplikátor od svého těla. (**Upozornění:** Použitý aplikátor zlikvidujte podle místních předpisů.)
- 4D Přitlačte lepicí pásku kolem senzoru, aby pevně přilnula k vaší kůži. (**Upozornění:** Po vložení senzoru zkontrolujte místo, zda nekrváčí. Pokud dochází ke krvácení, které neustává, vyjměte senzor a pomocí sterilní gázy aplikujte stálý tlak, dokud krvácení nepřestane.)

4 Po 15 dnech ukončete relaci

1. Odstraňte senzor

- a. Zvedněte okraj lepicí pásky.
- b. Pomalu sundejte lepicí pásku od kůže jedním tahem.

2. Likvidace

Zlikvidujte použitý senzor dle místních předpisů.

