

- snadnější správa diabetu
- přenos naměřených hodnot **bez použití čtečky**
- výsledky automaticky každé 3 minuty
- připojení pomocí Bluetooth
- **první** 15denní systém kontinuálního monitorování na světě
- **volně dostupný** v lékárnách
- pacienti s **diabetem 1. typu** mají nárok na **plnou úhradu** zdravotní pojišťovnou



balení obsahuje:

1 senzor, 1 aplikátor, 1 rychlý průvodce

- bez píchání do prstu
- bez kalibrace
- bez použití čtečky
- 15denní senzor



## iCan CGM aplikace

Pro připojení v reálném čase, generujte a sdílejte.



## iCan Reach aplikace

Můžete sdílet s 10 přáteli nebo rodinou.



[www.icansenzor.cz](http://www.icansenzor.cz)

[www.senzornaglukozu.cz](http://www.senzornaglukozu.cz)

Veškerá sdělení mají pouze informační charakter, bez záruky správnosti jeho obsahu. QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o., neručí za správnost obsahu z důvodu možných tiskových a redakčních chyb. **Reklama je určena pro odborníky.** Pozorně si přečtete návod k použití. Použití obrázků a textů není bez předchozího souhlasu dovoleno. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání 10/2024 © 2024 QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.



**informace a objednávky:**  
QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.  
Korytná 47, 100 00 Praha 10  
info@icansenzor.cz  
servis@icansenzor.cz

[www.quickseal.eu](http://www.quickseal.eu)  
[www.icansenzor.cz](http://www.icansenzor.cz)  
+420 234 142 105  
iCanczech  
@ican\_czech

# iCan i3 CGM

VAŠE **NOVÁ** VOLBA PRO SPRÁVU DIABETU

**15DENNÍ SENZOR BEZ ČTEČKY**  
**PRO KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ GLUKÓZY**

VŽDY  
MÁTE  
KONTROLU



15  
denní

sledujte  
glukózu  
v reálném  
čase



pohodlný  
a prodyšný




voděodolný  
a odolný proti potu




dlouhotrvající



hypoalergenní

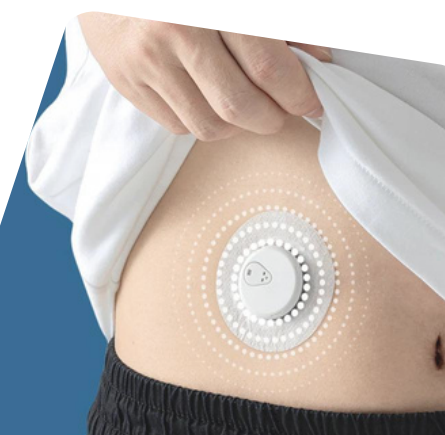

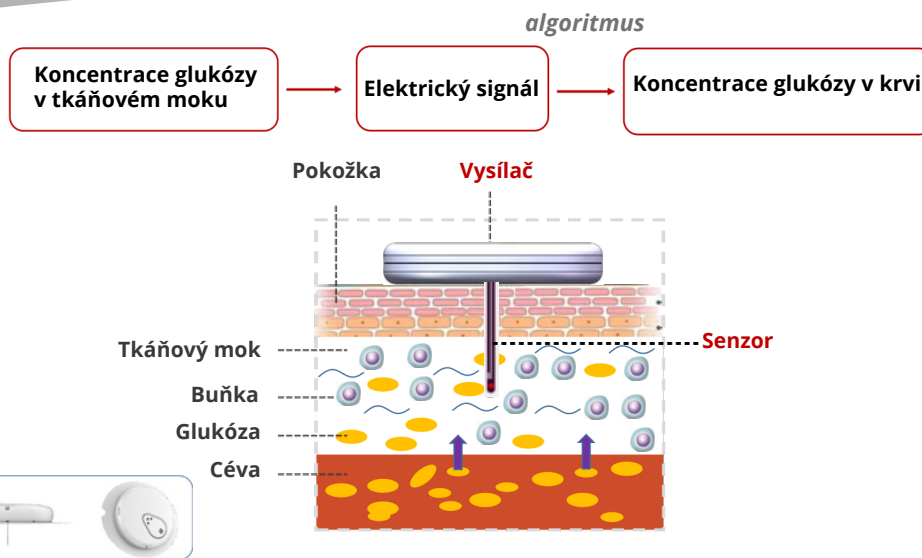

## Aplikace iCan i3



Sestavte sadu senzoru a aplikátoru




Senzor se aktivuje po odpojení od magnetu montážní sestavy.




Bezpečnostní zámek zabráňující nechtěnému vložení



Instrukce ke stažení

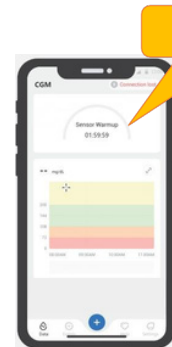


zahřátí senzoru

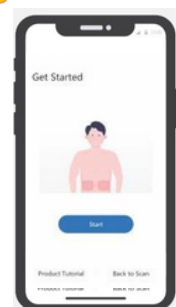


## Informace o aplikaci


### Režim „Více denní“

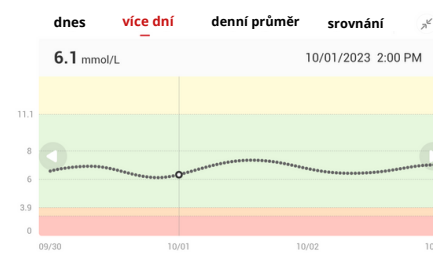


### Režim „Denní průměr“

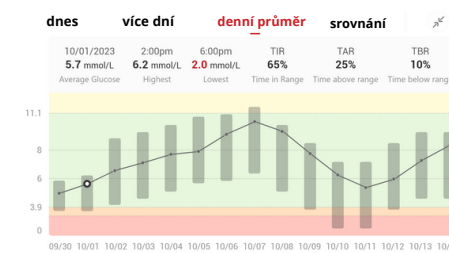

### Režim „Srovnání“

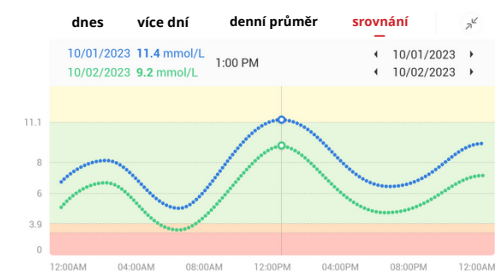



### Měření inzulinu

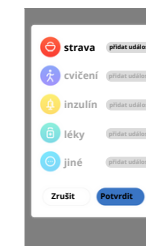

### Přizpůsobení upozornění




15 dní  
nejdelší  
životnost

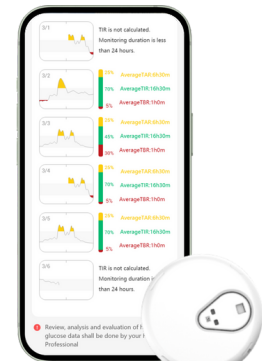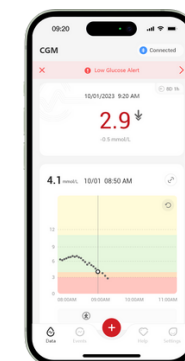

### připojení přes Bluetooth



Na obrázku nahoře je domovská obrazovka z aplikace pro iOS. Aplikace pro Android vypadá podobně.

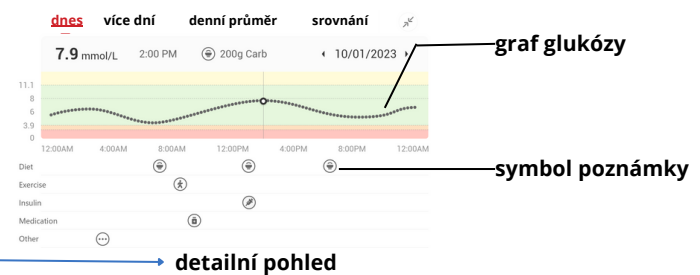

**Trendová šipka: Stabilní**  
Hladina glukózy se mění, ale méně než 0,16 mmol/L za 3 minuty.

**Trendová šipka: pomalu stoupá nebo klesá**  
Hladina glukózy se pomalu mění, více než 0,16 mmol/L nebo až 0,33 mmol/L za 3 minuty.

**Trendová šipka: Rychle stoupá nebo klesá**  
Hladina glukózy se rychle mění, více než 0,33 mmol/L nebo až 0,5 mmol/L za 3 minuty.

**Trendová šipka: Rapidně stoupá nebo klesá**  
Hladina glukózy se velmi rychle mění, více než 9 mg/dL (0,5 mmol/L) za 3 minuty.

## Komponenty CGM Sinocare iCan i3

Senzor



### Sterilní balení senzoru

Po sestavení s aplikátorem lze senzor zavést subkutánně.

Aplikátor



### Balíček aplikátoru

Sbírejte hodnoty glukózy každé 3 minuty a odešlete do mobilní aplikace prostřednictvím Bluetooth s nízkou spotřebou energie.

iCan CGM aplikace



**APP iCan Health**  
aplikace je k dispozici pro iOS i Android



Celé balení **iCan i3**  
jednorázového senzoru  
a aplikátoru

## Intuitivní aplikace pro iCan i3

### S aplikací iCan CGM můžete sledovat:

- svou hodnotu glukózy
- zobrazovat trendy a zprávy
- sdílet data s rodinou, přáteli a HCP kdekoli a kdykoli.

### S aplikací iCan Reach

může váš partner nebo pečovatel sledovat vaše údaje:

- o hodnotách glukózy
- trendy
- dostávat upozornění, když s nimi sdílíte svá data.

Jeden  
senzor

7160 výsledků

